

取扱説明書

保管用

ONKYO

デジタル補聴器
オーエッチエス ディー
OHS-D31

ご使用前に、必ずお読みになり正しくお使いください。
セーフティガイドも必ずご覧ください。


はじめて補聴器をご使用の方へ

音に慣れるための期間

補聴器で聞く新しい音に慣れるためには、ある程度の期間が必要です。そのため、次のようなことがあっても、少しずつ自然に聞こえるようになっていきます。

■音の大きさに驚く

暗いところから急に明るくなると眩しいように、音の大きさに驚くことがあります。

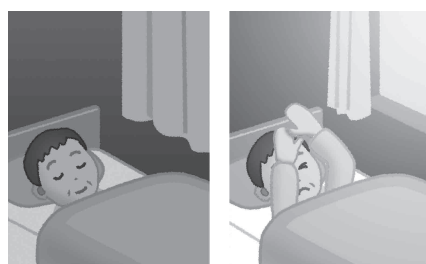

■雑音が気になる

ガサガサ、カチャカチャ音が気になるかもしれません。



■他人の声が違って聞こえる

他人の声がそれまでと違って聞こえるかもしれません。

■自分の声が違って聞こえる

自分の声に違和感があるかもしれません。

音に慣れるための方法

1 最初は静かな環境から使用する

まずは、自宅やその周辺で補聴器の使用に慣れてから少しずつ難しい状況に進むようにしましょう。

STEP 1 自宅の中を歩いて、どんな音に気づくか聴き分けてみる
自宅家族や友人の顔を見ながら話を聴いてみる
テレビやラジオを聴いてみる

STEP 2 自宅周辺を歩いて、いろいろな音を聴き分けてみる
静かな場所で2~3人で会話してみる

STEP 3 買い物に使ってみる
騒がしい集まりやレストランで会話してみる


2 少しの時間から使用する

少しの時間から使用しましょう。
最初の週は、1日に30分~2時間が目安です。

準備する



梱包内容

※取扱説明書内のイラストは、実際の製品と異なる場合がございます。

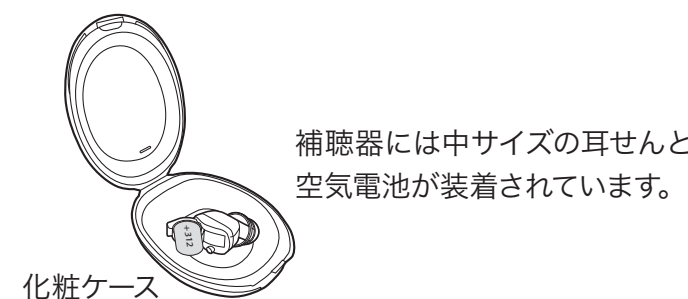


各部の名称

■補聴器「OHS-D31」

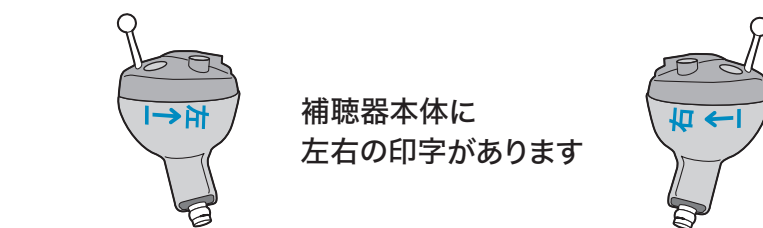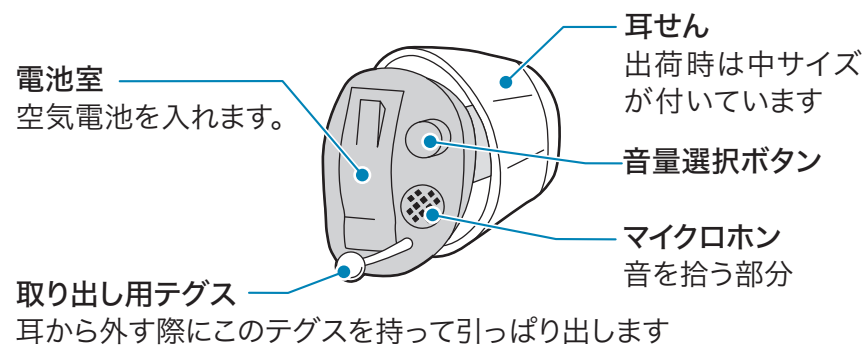

■リモコン「スマートキー（電池入り）」

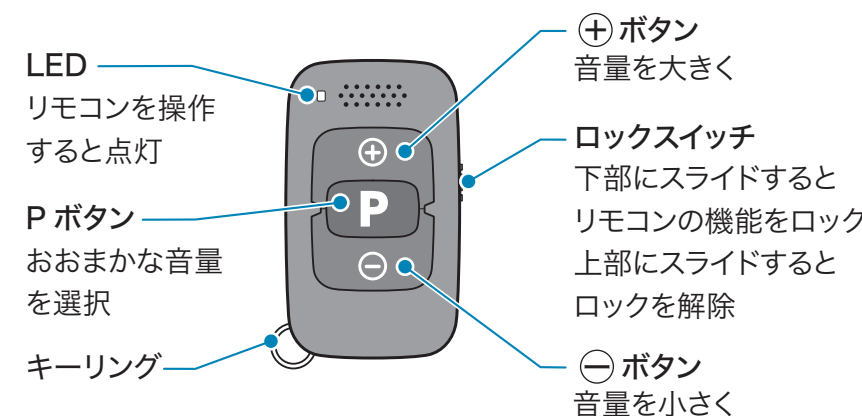


補聴器で音を聴く

1 補聴器の電源を入れます

空気電池の茶色いシールを剥がし、約1分間待ちます。



電池室を閉じて電源を入れます。

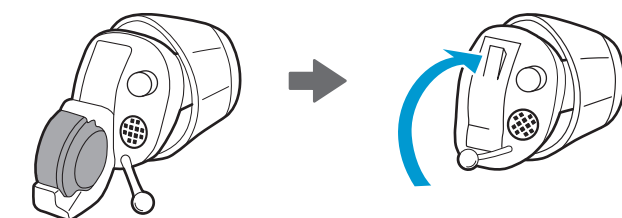

2 補聴器を耳に装着します

以下の手順で補聴器を耳に装着します。

取り出し用テグスを下にして耳の穴に入れます。

ピーピー音がしても正しく装着するとピーピー音は止まります。



耳たぶを指で軽く下に引っ張り、図のように押し込むと奥まで入ります。



マイクrohンを指で押さないでください。手に付いているゴミなどがマイクrohンに入るのを防ぎます。

耳せんは完全に耳の穴に入って外からは見えなくなります。鏡で確認してみましょう。




正しく装着してもピーピー音が止まらない場合は、裏面のQ8を参照してください。

3 聞こえ方を調節します

■おおまかな音量を選択します


補聴器本体の音量選択ボタンか、リモコンのPボタンを押して「小・中・大」の中から、おおまかな音量を選択します。

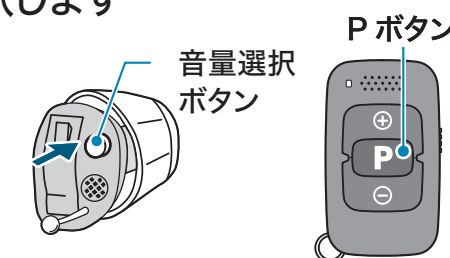

音量選択ボタン	合図音	音量
電源オン直後	-	小
1回目	プー	中
2回目	プープー	大
3回目	プープープー	テレビモード
4回目	プー	小

表面

リモコンを使用する時は、ロックスイッチを解除してください。上部にスライドすると解除できます。

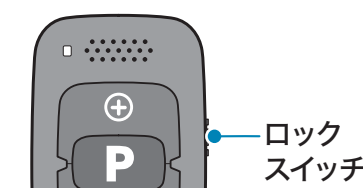


■大・中・小 選択の目安

あくまで目安です。
ご自身のお好みや環境・状況に合わせてご使用ください。

聞こえかた	目安
小	小さな声やささやき声が聞き取りにくい。テレビの音が大きいと言われる。
中	普通の会話が聞きづらいときがある。
大	大きい声で話しかけられても聞きづらいときがある。


■周囲の環境に合わせて音量を微調節します

周囲の音を聞きながら、リモコンの+/-ボタンを押して音量を微調節します。

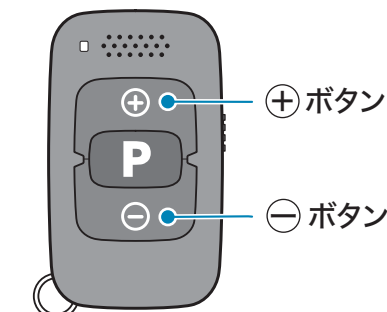

■テレビの音を聴く

補聴器本体の音量選択ボタンか、リモコンのPボタンを押して「テレビモード」を選択します。

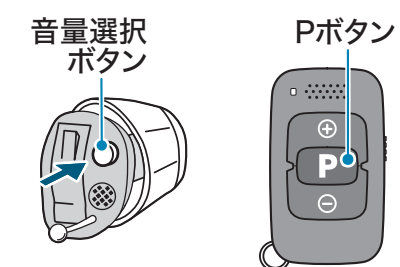


音量選択ボタン	合図音	音量
電源オン直後	-	小
1回目	プー	中
2回目	プープー	大
3回目	プープープー	テレビモード
4回目	プー	小

テレビの音を聞きながら、リモコンの+/-ボタンを押して音量を微調節します。

4 使用しないときは電源を切る

電池室の扉を完全に開き、電源を切ります。

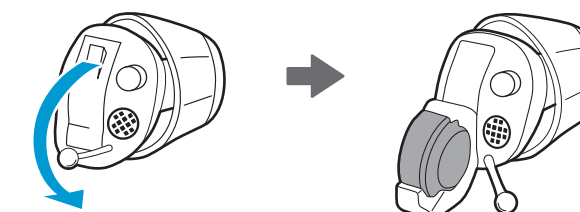



使い方のQ&A

電池

Q1 電池の交換方法は？

補聴器の電池室を完全に開けて、空気電池を取り出します。空気電池を斜めにするとうり出しやすくなります。

下の図の通り新しい電池を入れます。

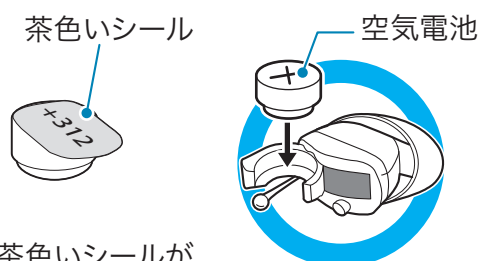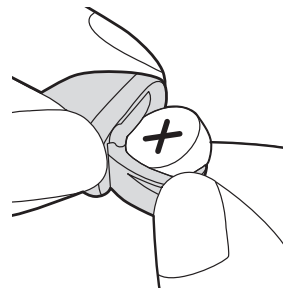

茶色いシールが貼ってある面がプラス(+)です。正しい電池室です。



ここは本体の穴です。誤った空気電池の入れ方です。

Q2 電池の使用時間はどれくらい？

空気電池は、周囲の環境に大変影響を受けやすく、使用時間が変わります。「OHS-D31」の使用時間は約150時間*ですが、乾燥、冷氣、二酸化炭素に影響を受け、3割～6割程度短くなることもあります。空気電池の容量がなくなると定期的に「ブーツ、ブーツ」と音がします。この音がしたら、新しい電池に交換してください。

*シグニア空気電池を使ってJIS(日本産業規格)に規定された方法で得られる数値から計算した連続使用時間

Q3 冬の電池の上手な使い方は？

電池寿命が短くなる3大原因は、乾燥、低い温度、二酸化炭素です。電池を構成する化学物質は、一般に寒いと活動が鈍り、温かいと活発になる特徴があります。冬は以下の注意をしてご使用ください。

体温などで温めて使用してください
寒いと、電池の放電電圧が低くなり、補聴器の動作時間が短くなります。手など体温で温めてください。

シールを剥がしてから長く待つ
電池を使用する際、シールを剥がした直後は正常に動作しません。通常はシールを剥がしてから約1分後に使用を開始します。しかし、寒いところでは反応が遅くなるため、使えるようになるまでさらに時間を要します。

部屋の換気をこまめにする
冬場の暖房器具から発生する二酸化炭素の影響で電池寿命が短くなります。定期的に部屋の換気をしてください。

*「オンキヨー」、「Onkyo」はオンキヨー株式会社の商標または商標登録です。

耳せん

Q4 耳せんの選び方は？

購入時に補聴器本体に取付されていた耳せんのサイズは「中」になります。大・中・小のサイズが合わない場合は、フリーサイズを試します。フリーサイズは、カサの部分に切れ目があり、こもり感を軽減しますが、大・中・小のサイズに比べて低音が聞き取りにくくなります。

私の耳せんのサイズ(口に印をつけておきましょう)			
小サイズ	中サイズ	大サイズ	フリーサイズ

Q5 耳せんの交換時期は？

耳せんは消耗品です。汚れ、変色、損傷した場合は新しいものと交換してください。劣化した耳せんを使用すると、耳の中に耳せんが残ってしまう危険があります。まだ汚れていなくても**3カ月を目安に交換**してください。購入は、セーフティーガイドの「**オンキヨー補聴器サポートセンター 販売商品**」をご覧ください。

Q6 耳せんを取り外すには？

1 耳せんを裏返します。

イラストは左耳用の「OHS-D31」です。

2 補聴器と耳せんの境目に爪を押し込んでください。根元をつかむイメージで爪を押し込むと耳せんが補聴器から外れます。

耳せんの芯の部分(白いプラスチックのリング)が耳せん側に残ります。

Q7 耳せんを取り付けるには？

1 耳せん「大・中・小」にある突起と補聴器の曲がりを下図のように揃えます。

左耳用 前 右耳用

耳せんの突起が前方向

耳せん「フリー」サイズは突起がなく、向きを揃える必要はありません。

2 耳せんを逆さまに机に置き、上から補聴器の音の出口をはめます。パチッと合います。耳せんを軽くひっぱって抜けないことを確認します。

イラストは左耳用の「OHS-D31」です。

音の入口 取り付け部分 は銀色です。 音の出口

正しい耳せんの位置です。

ピーピー音

Q8 ハウリング(ピーピー音)が鳴ります

「ピーピー音」は故障でなく、補聴器が正常に音を増幅している証です。次の4点の場合にピーピー音が鳴ります。

- 耳せんがゆるい
→ 大きなサイズの耳せんと、交換してください。
- 耳に正しく装着されていない
→ 表面「**2 補聴器を耳に装着します**」を見ながら正しく装着してください。
- 大きな音量を選択している
→ 耳せんのサイズを適切に選び、正しく耳に装着してから、再度音量を選択してください。
- 耳に手をかざしたり受話器を近づけたりする
→ 装着中の「OHS-D31」にもものが近づくと、「ピーピー音」が鳴る場合がありますので、近づけないようにしましょう。

上記の方法を試しても「ピーピー音」が止まらない場合、サポートセンターまでお問い合わせください。

ミュート

Q9 ミュート(消音)するには？

補聴器本体の音量選択ボタンを長押しします。または、リモコンのPボタンと⊖ボタンを同時に長押しします。

音量選択ボタン Pボタン ⊖ボタン

解除するときも同じように長押しします。補聴器の電池室を完全に開いて電源を切った場合も、ミュートは解除されます。

ミュートでは電源は切れません。ミュートは、補聴器から音を出させない待機状態のため、微弱電流を消費します。


補聴器のお手入れ・保管

Q10 入浴、シャワー、就寝時に保管するには？

入浴やシャワーの時は、必ず外します。入浴後や雨の中などの濡れた耳には装着しないでください。就寝時には外します。その際、弊社で販売している乾燥カップに入れておきますと、使用中の湿気が取れますので、補聴器の寿命を長くすることができます。購入は、セーフティーガイドの「**オンキヨー補聴器サポートセンター 販売商品**」をご覧ください。

Q11 補聴器を掃除するには？

掃除ブラシや乾いた布で掃除します。音の出口を上に向けて掃除すると、耳あかが補聴器の中に入ってしまう。音の出口を右図のようにして掃除してください。耳あかの状態や整髪料の使用頻度によって汚れが付着し、故障につながる場合があります。掃除しても汚れが取れなくなった場合は、新しい耳せんと交換してください。

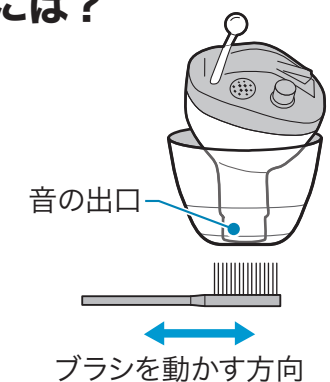


リモコン

Q12 リモコンの電池を交換するには？

お買上頂いた時点でリモコンには電池が入っていますので、そのままご使用いただけます。電池の交換時期がきたら、電池は**CR2450**を家電量販店等でお買い求めください。

交換方法

- 1 付属のツールを電池室カバーの上部の穴に垂直に押し込みます。
- 2 ツールを押し込んだ状態で電池室カバーを押し引いて開けます。
- 3 タブを引っ張って古い電池を取り出します。
- 4 新しい電池を電池室の内側にある「+」の表示に合わせて電池の+面を上にして、電池を突起の下に滑り込ませてください。
- 5 下図に沿って電池室カバーを取り付けてください。

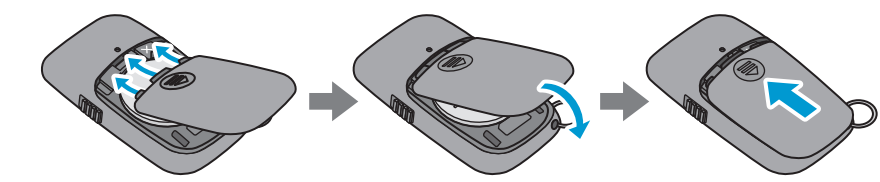

*電池の交換後、約1年間お使いになれますが、スマートキーの使用頻度により電池寿命が短くなる場合があります。付属の電池は、お試用電池です。電池寿命が短い場合があります。